



Guía de adquisición MovumStudio

El resultado en la identificación de implantes dentales por parte de nuestros algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) depende de la calidad de las imágenes aportadas. Por ello, es necesario que siga las siguientes indicaciones para obtener la máxima precisión en la identificación de implantes.

- 1** Utilice radiografías periapicales en lugar de radiografías panorámicas.

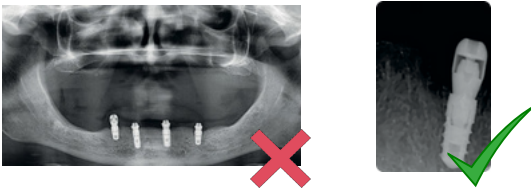


- 2** La macrogeometría debe ser visible en toda la longitud del implante, incluyendo plataforma y ápice.

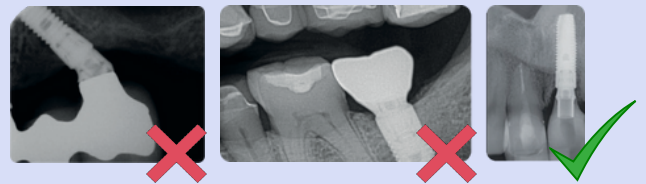


- 3** Priorice la realización de radiografías con paralelizadores o dispositivos similares.




- 4** La radiografía debe estar correctamente expuesta.

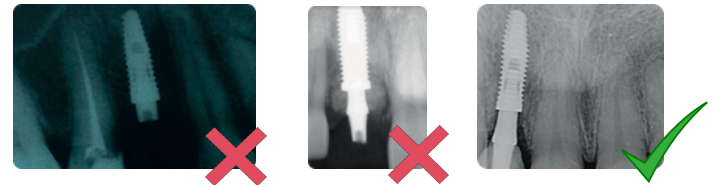

- 5** Procure que la radiografía no esté dañada, evitando cualquier tipo de artefacto en la imagen que coincida con los implantes a identificar.

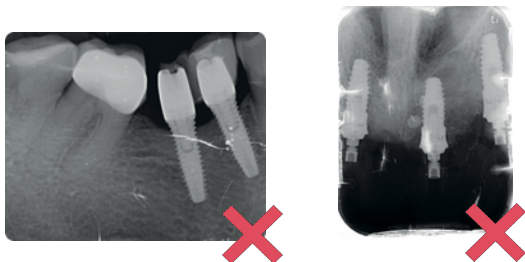

- 6** Priorice la subida de radiografías exportadas directamente desde el ordenador, a través de su software de gestión, o bien, mediante captura de pantalla. Evite realizar fotografías con Smartphone, ya que se pierden detalles.

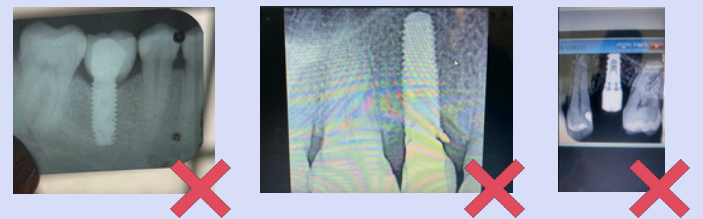

- 7** Nuestro sistema sólo puede identificar hasta 5 implantes por radiografías. Si es necesario, recorte la imagen antes de subirla.

